

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU KARDIOLOŠKI STETOSKOP HS-30K

**Pakovanje sadrži:** stetoskop, rezervne plastične nastavke za uši, rezervnu membranu i uputstvo za upotrebu.

## Opšte informacije

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Ne izlažite stetoskop ekstremnoj toploti ili hladnoći.
- Nemojte da sterilizujete stetoskop vrelom parom.
- Ne stavljajte stetoskop u tečnost za čišćenje.
- Stetoskop može biti oštećen oštrim i šiljastim predmetima.
- Nemojte stavljati stetoskop previše duboko u uši jer se možete povrediti.
- Nemojte koristiti stetoskop bez membrane.



## Upotreba

Stetoskop je dijagnostički instrument za slušanje raznih zvukova (srca, pluća i drugih organa u telu). Stetoskop treba da koriste samo stručne osobe.

Nakon što stavite stetoskop u uši, postavite glavu stetoskopa na željeni deo tela sa blagim pritiskom.

## Upotreba glave stetoskopa

Stetoskop se može podesiti od zvona do membrane, kao i obrnuto pošto se glava stetoskopa može okretati za 180° u oba smera. Kada je glava stetoskopa dobro nameštena bilo na zvonu ili membrani čuće se zvuk „klik“.

U zavisnosti od dela tela koji se sluša koriste se ili zvono ili membrana. Membrana se koristi za slušanje visokih frekvencija, a zvono za slušanje niskih frekvencija.

Kada postavite stetoskop u uši, blago pređite prstom preko membrane da biste čuli da li stetoskop radi.

## Podešavanje

Metalni deo - slušalice na stetoskopu su napravljene i podešene tako da konforno staju u uho i onemogućavaju prodor drugih zvukova u uho. Plastični deo stetoskopa koji se stavlja u uši treba da bude postavljeni u uši u prednjem položaju.


Ako metalni deo - slušalice nije zategnut onako kako to Vama odgovara, možete ga prilagoditi na sledeći način:

### Ako je previše zategnuto:



Držite metalni deo – slušalice kao što je prikazano na slici i polako ga razvucite. Ponovite postupak dok ne podesite onako kako Vam odgovara.

### Ako je previše labavo:

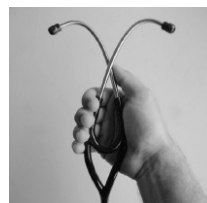

Uхватite metalni deo – slušalice kao što je prikazano na slici i pažljivo pritisnite tako da se obe slušalice ukrste.

## Zamena membrane

Da biste zamenili membranu, glava stetoskopa treba da bude postavljena na stolu tako da membrana bude okrenuta na gore. Palcem i kažiprstom odvojite gumeni prsten dok ne spadne sa glave stetoskopa.

Da biste postavili novu membranu postavite glavu stetoskopa na sto tako da membrana bude okrenuta na gore. Zatim ispravno postavite novu membranu. Uzmite gumeni prsten i vratite ga na njegovo mesto. Najlakši način da to uradite jeste da uhvatite gumeni prsten tako da njegova tanja ivica bude okrenuta na dole. Fiksirajte gumeni prsten palcem i kažiprstom i brzo kružnim pokretom gurnite prsten koristeći palac druge ruke. Poravnajte prsten tako da membrana bude čvrsto nameštena.

## Zamena plastičnih nastavaka za uši

I čvrsti i mekani nastavci za uši se mogu koristiti na slušalicama da bi se prilagodila akustična osetljivost i udobnost stetoskopa. Da biste zamenili plastične nastavke za uši jednostavno ih odvrnite i postavite one koje želite na slušalice. Da biste izbegli povrede proverite da li ste dobro postavili plastične nastavke za uši na slušalice.

## Čišćenje

Za čišćenje koristite mekanu krpu i vodu sa blagom sapunicom ili alkoholom (70% Isopropyl). Membrana se čisti samo alkoholom (70% Isopropyl). Nikada ne koristite abrazivna sredstva, razređivač ili benzin za čišćenje.

**Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:**  
**VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533,**  
**e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs)**  
**[www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)**