

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU STETOSKOP HS-30N (SA JEDNOM GLAVOM)**

**Pakovanje sadrži:** stetoskop, rezervne plastične nastavke za uši, rezervnu membranu i uputstvo za upotrebu.

### **Opšte informacije**

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Ne izlažite stetoskop ekstremnoj toploti ili hladnoći.
- Nemojte da sterilizujete stetoskop vrelom parom.
- Ne stavljajte stetoskop u tečnost za čišćenje.
- Stetoskop može biti oštećen ostrim i šiljastim predmetima.
- Nemojte stavljati stetoskop previše duboko u uši jer se možete povrediti.
- Nemojte koristiti stetoskop bez membrane.



### **Upotreba**

Stetoskop je dijagnostički instrument za slušanje raznih zvukova (srca, pluća i drugih organa u telu). Stetoskop treba da koriste samo stručne osobe.

Nakon što stavite stetoskop u uši, postavite glavu stetoskopa na željeni deo tela sa blagim pritiskom.

Ovaj model se sastoji od lagane aluminijumske glave, prilagodljivih hromiranih slušalica, izdržljivog PVC jednodelnog creva u obliku slova Y i ABS nastavaka za uši.

Kada postavite slušalice u uši, blago pređite prstom preko membrane da biste čuli da li stetoskop radi. Ovaj model omogućava dobar zvuk i udobnost pri korišćenju.

**Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:**  
**VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533,**  
**e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs)**  
**[www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)**