


## NEOPRENE STEZNIK ZA LAKAT SA MAGNETIMA INT-047 (univerzalna veličina)

### Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu!

Steznici sa magnetima su napravljeni od visokokvalitetne neoprene gume. Obezbeđuju čvrst, snažan i ujednačen pritisak, smanjuju bol i dozvoljavaju pun pokret povređenog dela tela. Magneti su strateški raspoređeni unutar steznika (jačine 1000 Gaussa svaki) tako da obezbeđuju maksimalni oporavak povređenog dela tela, poboljšavaju cirkulaciju, ubrzavaju prirodan tok ozdravljenja stimulišući krvne sudove i podižući nivo kiseonika tretiranog dela tela. Pogodni su za sportske i svakodnevne aktivnosti. Imaju podesivu čičak traku. Za višekratnu upotrebu.

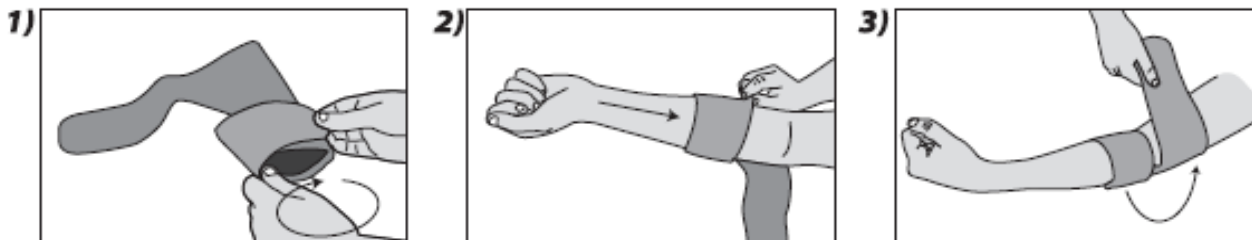

**Napomena:** Steznik treba optimalno podesiti kako bi se obezbedili maksimalni pozitivni efekti i izbeglo preterano pritiskanje. Ako steznik koristite nakon povrede, obratite se lekaru ukoliko ne dođe do poboljšanja u roku od 72 sata. Ako je povreda ozbiljna ili ukoliko imate bilo kakvih sumnji konsultujte lekara. Ukoliko steznik koriste deca neophodan je nadzor odraslih. Držite dalje od male dece.

**Upozorenje:** Nemojte koristiti steznik sa magnetima: ukoliko imate ugrađen pacemaker, unutrašnji defibrilator ili bilo kakav električni implant i ako ste u drugom stanju. Pojedine osobe mogu biti osetljive na materijal od koga je napravljen ovaj steznik. Nemojte koristiti steznik ukoliko ste naneli masti, ulja ili kreme koje imaju dejstvo grejanja. Ukoliko primetite osetljivost ili osip, odmah prekinite sa upotrebom i obratite se lekaru.

**Održavanje:** ručno pranje u mlakoj vodi i sušenje na vazduhu

**Snaga magnetnog polja:** 12 magneta po 1000 Gaussa

**Sastav:** 75% neoprene i 25% najlon

**Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:**

**VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs), [www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)**