

CERVIKALNA KRAGNA FT-1163S / FT-1164M / FT1165L

Uputstvo za upotrebu

Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za ponovnu upotrebu.

Kragna je napravljena od materijala visokog kvaliteta koji obezbeđuje efikasnu podršku kako bi se unapredio tretman i sprečilo dalje povređivanje povređenog i oslabljenog mišića ili zgloba.

Fortuna ortopedski proizvodi su pogodni za svakodnevnu upotrebu.

Korišćenje: Kragnu treba pričvrstiti pravilno kako biste osigurali najveću korist i izbegli preterani pritisak. Ako kragnu koristite nakon povrede potražite pomoć lekara ako se stanje ne popravi u roku od 72 sata. Odmah se obratite lekaru ako je povreda ozbiljna ili sumnjate na to. Potreban je nadzor ako kragnu koriste deca. Držite van domašaja male dece.

Upozorenje: Ako se pojavi upala ili osip odmah prekinite da koristite kragnu i obratite se lekaru.

Održavanje: Ručno pranje u mlakoj vodi i sušenje na vazduhu.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Zrmanjska 3, tel: 011/7544-533, e-mail: office@vana.co.rs, www.vana.co.rs