



UPUTSTVO ZA UPOTREBU ULTRAZVUČNI INHALATOR ZA DECU PINGVIN

Molimo da se držite opštih sigurnosnih napomena pri korišćenju inhalatora PINGVIN. Ovaj uređaj treba koristiti isključivo za njegovu namenu opisanu u ovom uputstvu sa lekovima pod nadzorom i prema uputstvu lekara.



Delovi inhalatora:

1. Nastavak za usta,
2. Gornji poklopac,
3. Čašica za lek,
4. Čunj za transfer,
5. Indikator visine vode (min -max),
6. Pretvarač,
7. Telo inhalatora,
8. Dugme za uključivanje/start,
9. Dugme za kontrolu jačine inhaliranja,
10. Svetla za indicaciju jačine inhaliranja (maksimalna, srednja i minimalna)

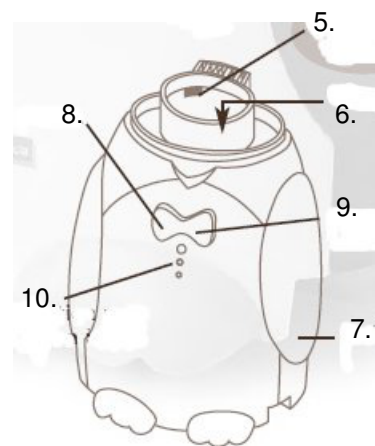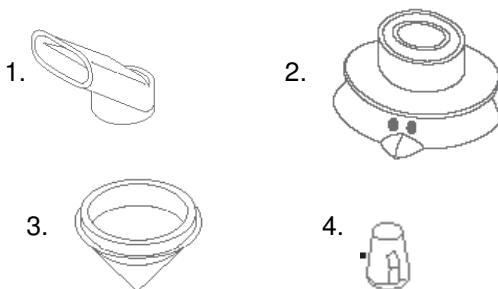

U standardnom pakovanju se nalazi: inhalator, AC adapter, maska za decu, nastavak za usta, nastavak za nos, čašice za lek (5 kom), crevo za inhaliranje i torba za inhalator.

OPCIONO možete poručiti cuclu za inhaliranje beba.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA:

- Da biste izbegli strujni udar držite uređaj dalje od vode, ne kvasite priključni kabl u tečnost, ako vam uređaj dospe u vodu, pre nego što ga izvadite isključite ga iz struje.
- Nikad ne upotrebljavajte uređaj ako je i malo oštećen (uključujući priključni kabl), ako je pao u vodu ili bio natopljen u vodi. Odmah ga pošaljite na servisnu popravku.
- Uređaj ne smete upotrebljavati gde ima zapaljivih plinova.
- Isključite uređaj iz struje pre čišćenja, punjenja lekom i nakon svake upotrebe.
- Ne blokirajte vazdušne otvore na uređaju i ne stavljajte uređaj na meku površinu da se otvori za vazduh ne bi zatvorili.
- **Ukoliko su posuda za lek i rezervoar za vodu prazni - ne koristite uređaj.**
- Ne koristite druge priključke osim onih preporučenih od proizvođača.
- Ne otvarajte poklopac uređaja dok radi.
- **Ne koristite uređaj duže od 20 minuta po tretmanu i napravite pauzu od 30 minuta između dva tretmana.**
- Ne stavljajte uređaj direktno na sunce, gde je visoka temperatura ili vlažnost.
- Očistite sve potrebne delove nakon upotrebe u skladu s uputstvima.

ČIŠĆENJE: Bitno je da inhalator očistite pre prvog korišćenja i posle svakog tretmana. Isključite aparat iz struje i nikada ga ne potapajte u vodu. Delove inhalatora očistite blagim deterdžentom ili dezinfektivnim sredstvom i pustite da se sami osuše na vazduhu pre sastavljanja. Glavni uređaj čistiti vlažnom mekom krpom a ne abrazivnim sredstvom.

UPOTREBA INHALATORA Isključite aparat iz struje pre svakog čišćenja, za vreme punjenja i posle svakog korišćenja.

Punjenje rezervoara za vodu:

1. Skinite gornji poklopac povlačeći ga prema gore. Izvadite čašicu za lek ukoliko je unutra.
2. Sipajte destilovanu vodu temperature 20° C – 30°C u rezervoar za vodu do tačno označene visine (između dve linije koje se nalaze u rezervoaru za vodu – pogledati delove inhalatora – indikator nivoa vode, deo pod brojem 5.). Ne koristite drugu tečnost osim destilovane vode za punjenje rezervoara za vodu jer to može oštetiti pretvarač. Korišćenje vode ispod 20° C stepeni rezultira smanjenim nivoom aerosola, dok korišćenje toplije vode iznad 30° C rezultira višim nivoom aerosola.



indikator nivoa vode



Punjenje čašice za lek:

1. Stavite čašicu za lek u rezervoar za vodu.
2. Sipajte lek direktno u čašicu za lek,
3. Vratite gornji poklopac nazad.

Važna napomena: Kod ultrazvučnih inhalatora se ne mogu koristiti Pulmico-respule (Pulmicort) i drugi praškasti lekovi.

Maksimalan kapacitet čašice za lek je 4,5 ml i ne sme biti prekoračen. Razredite guste lekove ili lekove volumena 2ml i manje - fiziološkim rastvorom kako biste osigurali zapreminu od najmanje 4 ml.

Lekove koristite samo uz preporuku lekara.

Čašicu za lek možete koristiti višekratno vodeći računa da se ne ošteti - probuši, u tom slučaju zamenite je novom. U pakovanju se nalazi 5 čašica za lek.

Uključivanje aparata:

1. Stavite uređaj na čvrstu ravnu i suhu površinu kada ste sigurni da su rezervoar za vodu i čašica za lek pravilno napunjeni i kada je nastavak za usta pravilno pričvršćen na gornji poklopac,
2. Uključite uređaj u struju
3. Pritisnite dugme start. Uređaj automatski postiže najjači intenzitet inhalacije-svetlo za pokazivanje intenziteta inhalacije svetleće na najjačem nivou (max).

Prilagodavanje protoka vazduha i stepena inhalacije:

1. Vaš ultrazvučni inhalator ima 3 jačine protoka vazduha (inhaliranja) – maksimalno, srednje i minimalno. Pritiskom na dugme za kontrolu jačine inhaliranja (na slici deo pod brojem 9) možete menjati nivo inhaliranja počev od max (maksimalan nivo), med (srednji nivo) i min (najniži nivo inhalacije).
2. Prema uputstvima Vašeg lekara podesite jačinu inhaliranja kako biste prilagodili protok vazduha. Svetla će pokazati odabranu jačinu inhalacije (maksimalno, srednje, minimalno).
3. Čunji za transfer postavljeni unutar pretvarača pojačavaju inhalaciju. Ako je jačina suviše jaka čunji treba pažljivo ukloniti nakon što se uređaj potpuno ohladi. Ponovo pokrenite uređaj i nastavite tretman.

Početak tretmana – inhalator je dizajniran tako da počne sa nižim intenzitetom raspršivanja na početku koji se pojačava nakon nekoliko minuta. Držite oči podalje od izlaza aerosola. Ukoliko primetite bilo kakvu abnormalnost prekinite korišćenje i odnesite uređaj na ispitivanje i popravku. Ne naginjite uređaj i na tresite ga dok radi. Otvaranje poklopca inhalatora tokom rada može izazvati ozbiljne povrede.

Završetak tretmana:

1. Kada je tretman završen pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj. U suprotnom, uređaj će se automatski ugasi nakon oko 10 minuta neprestanog korišćenja.
2. Isključite adapter iz struje i izvucite utikač iz AC utičnice na uređaju.
3. Pustite da se uređaj ohladi 20-30 minuta. **Uređaj ne treba koristiti duže od 20 minuta odjednom; pričekajte 30 minuta pre ponovnog korišćenja uređaja.**

Nakon svakog korišćenja:

1. Pustite da se uređaj potpuno ohladi,
2. Uklonite gornji poklopac,
3. Pažljivo pomerite čašicu za lek i prospite ostatke leka,
4. Ispraznite rezervoar za vodu i obrišite ga mekom krpom,
5. Pratite uputstva za čišćenje.

REŠAVANJE PROBLEMA Ukoliko primetite neku nepravilnost tokom korišćenja, proverite:

Uređaj ne radi kada je pritisnuto dugme za uključivanje: a) proverite da li je AC adapter povezan sa utičnicom i da li je uključen u uređaj, b) proverite da li je rezervoar za vodu napunjen do označene granice.

Nema aerosola ili je njegova visina preniska: a) proverite da li u čašici za lek ima leka, b) proverite da li je čašica za lek oštećena, c) proverite da li je pretvarač čist, d) proverite da li ste sipali vodu u rezervoar za vodu

SPECIFIKACIJA INHALATORA

Ime modela	PINGVIN ultrazvučni inhalator
Snaga	230 VAC 50Hz
Potrošnja struje	oko 10W
Ultrazvučna frekvencija	2,5 MHz
Raspršivanje	0,2 do 0,7 ml/min zavisno od gustine leka
Veličina čestice	5 µm MMAD
Kapacitet čašice za lek	oko 4,5 ml maksimalno
Merač vremena	oko 10 minuta
Dimenzije	12,5 cm x 6 cm x 8 cm
Težina	oko 185 g
Standardna oprema	inhalator, AC adapter, maska za decu, nastavak za usta, nastavak za nos, čašice za lek (5 kom), crevo za inhaliranje i torba za inhalator.
Oprema (opcija)	Cucla za inhalaciju

Uvoznik i ovlašćeni serviser za Srbiju:

VANA d.o.o.

Beograd, Stevana Brakusa 6

tel/fax: 011/7544-533

e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs