


AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber

KOMORA SA USNIKOM
KOMORA SA MASKOM

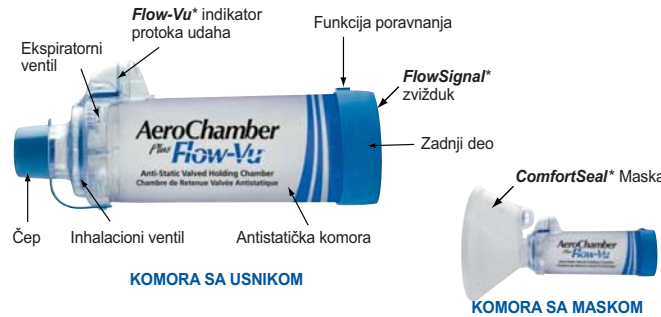

NAMENA

Ova komora je namenjena da se koristi sa izmerenom dozom inhalera da administira aerosol lek na pluća, kao što je prepisano od strane vašeg lekara. Ukoliko imate neko pitanje vezano za rad ili korišćenje ovog proizvoda, molimo vas da se obratite vašem lekaru.

KAKO DA KORISTITE VAŠU NOVU KOMORU

Ova komora se može koristiti po raspakivanju. Pre upotrebe, proverite da li ste ova uputstva dobili sa komorom za inhalaciju i da su uputstva pročitana i dostupna u svako doba.

KOMORA SA MASKOM KOMORA SA USNIKOM

<p>1</p> <p>Pogledajte u komoru da bi se uverili da nema ništa u njoj. Pre upotrebe, pregledajte komoru. Ukoliko uočite neke nepravilnosti, obavezno je zamenite.</p>	<p>2</p> <p>Uklonite poklopac sa inhalera i komore.</p>	<p>3</p> <p>Protresite inhaler neposredno pre upotrebe, prema uputstvu koje ste dobili sa njim.</p>	<p>4</p> <p>Stavite inhaler u zadnji deo komore.</p>	<p>5</p> <p>Stavite usnik u usta i obuhvatiti ga usnama da bi se obezbedilo da usnik dobro prijanja. Flow-Vu* indikator se pomera samo ako je pacijent dobro stavio usnik.</p>	<p>6</p> <p>Izdahnite lagano i pritisnite inhaler na početku sporog udisanja. Koristite Flow-Vu* indikator da pomogne u koordinaciji ovog koraka. Udahnite lagano i sporo kroz usta do punog udara. Zadržite dah 5 – 10 sekundi, ako je to moguće. U suprotnom, držite usnik čvrsto usnama i dišite normalno 2 – 3 puta kroz komoru od kada je inhaler pritisnut. Usprite disanje FlowSignal* zvižduk. To znači da se inhalirate previše brzo. Upravlja jedan (1) naduvati na vreme.</p>	<p>7</p> <p>Pratite uputstva dobijena uz komoru za inhalaciju koliko da se sačeka pre nego se ponovi postupak 3 – 6.</p>
<p>1</p> <p>Pogledajte u komoru da bi se uverili da nema ništa u njoj. Pre upotrebe, pregledajte komoru. Ukoliko uočite neke nepravilnosti, obavezno je zamenite.</p>	<p>2</p> <p>Uklonite poklopac sa inhalera i komore.</p>	<p>3</p> <p>Protresite inhaler neposredno pre upotrebe, prema uputstvu koje ste dobili sa njim.</p>	<p>4</p> <p>Stavite inhaler u zadnji deo komore.</p>	<p>5</p> <p>Stavite masku na lice i proverite da li dobro prijanja. Flow-Vu* indikator se pomera samo kada maska dobro prijanja.</p>	<p>6</p> <p>Izdahnite lagano i pritisnite inhaler na početku sporog udisanja. Koristite Flow-Vu* indikator da pomogne u koordinaciji ovog koraka. Zadržite masku u prijanjajućem položaju 5 - 6 udara pošto ste pritisli inhaler. Usprite disanje ako čujete FlowSignal* zvižduk. To znači da se inhalirate previše brzo. Upravlja jedan (1) naduvati na vreme.</p>	<p>7</p> <p>Pratite uputstva dobijena uz komoru za inhalaciju koliko da se sačeka pre nego se ponovi postupak 3 – 6.</p>

UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE MASKE I USNIK KOMORE

Ova komora se može koristiti po raspakivanju i zatim je čistiti nedeljno.

<p>1</p> <p>Skinite samo zadnji deo komore. Nemojte da skidate masku ili usnik.</p>	<p>2</p> <p>Potopite oba dela 15 minuta u blagi rastvor mlake vode i deterdženta. Perite lagano.</p>	<p>3</p> <p>Isperite delove u čistoj vodi.</p>	<p>4</p> <p>Istresite višak vode i ostavite ih da se suše u vertikalnoj poziciji. Osigurajte da delovi budu suvi pre ponovnog korišćenja.</p>	<p>5</p> <p>Da sklopite, centrirajte zadnji deo sa funkcijom poravnanja prednjeg dela komore sa Flow-Vu* indikatora, kao što je prikazano. Pritisnite čvrsto da biste pričvrstili zadnji deo.</p>
--	---	---	--	---

Napomena:

- Proizvod bi trebalo zameniti nakon 12 meseci korišćenja. Uslovi sredine skladištenje i učestalost upotrebe može uticati na životni vek proizvoda.
- Ovaj proizvod ne sadrži lateks.
- Nemojte da delite sa drugima ovaj medicinski proizvod.
- Kada nije u upotrebi, odložite ga u odgovarajuću ambalažu.
- Ako primetite nagomilavanje leka u komori, operite unutrašnjost komore sa mekom krpom.

Upozorenja:

- Ne ostavljajte decu bez nadzora same sa komorom.

AeroChamber Plus* Flow-Vu* Chamber complies with CSA Standard Z264.1-02. 101727-001 Rev B. * trade-marks and registered trade-marks of Trudell Medical International. © 2016. All rights reserved.



Proizvođač:



Trudell Medical International*

725 Third Street, London, Ontario, Canada N5V 5G4

E-mail: customerservice@trudellmed.com

1-866-510-0004

www.trudellmed.com

