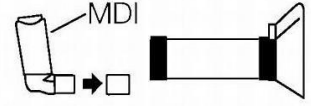
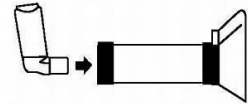
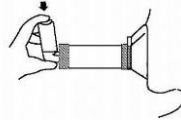
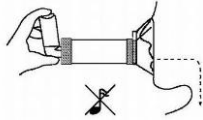
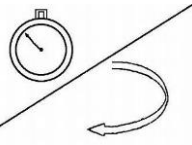


KOMORA ZA INHALACIJU

Uputstvo za upotrebu (jednu komoru može koristiti samo jedan pacijent)

<p>1. Proverite unutrašnjost komore sa obe strane, da slučajno nema delova koji ne pripadaju komori.</p> 	<p>2. Uklonite zaštitu sa inhalacione pumpice i postavite konektor maske preko usnika komore dok se sigurno ne uklopi.</p> 	<p>3. Ubacite inhalacionu pumpicu u komoru i dobro protresite.</p> 	<p>4. Postavite čvrsto masku preko nosa i usta, duboko izdahnite, pritisnite inhalacionu pumpicu i odmah polako udahnite. Zadržite dah 8-10 sekundi.</p> 	<p>5. Usporite inhaliranje ako čujete zvučni signal.</p> 	<p>6. Pratite uputstvo koje ste dobili uz inhalacionu pumpicu - koliko vremena treba da sačekate pre nego što ponovite proces (korake 3-5), u skladu sa propisanom terapijom.</p> 
---	---	--	---	---	--

Uputstvo za čišćenje

<p>1. Skinite samo zadnji deo komore. Nemojte da skidate masku ili usnik tokom čišćenja.</p> 	<p>2. Potopite oba dela u mlakoj vodi sa tečnim deterdžentom i ostavite 15 minuta. Promućkajte.</p> 	<p>3. Isperite u čistoj vodi.</p> 	<p>4. Protresite da izbacite višak vode. Ne trljajte da bi se osušilo.</p> 	<p>5. Ostavite da se osuši prirodno u vertikalnom položaju.</p> 	<p>6. Stavite zadnji deo kada je komora potpuno suva i spremna za upotrebu.</p> 
---	---	--	---	---	--